





## Provox® Life™ Standard Adhesive aanbrengen en verwijderen

### 1. Reinigen

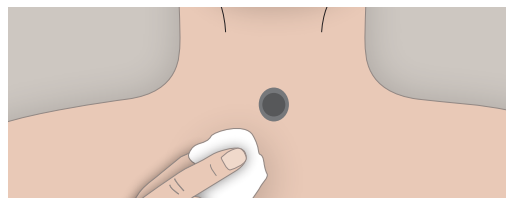


Reinig de huid rond uw stoma met een Provox Cleaning Towel of met water en zeep. Laat uw huid drogen.

### 2. Voorbereiden

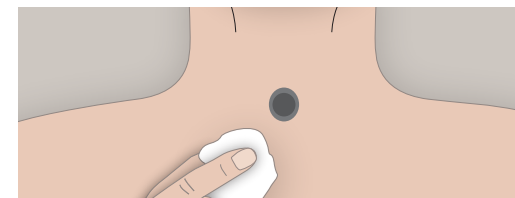


Breng indien nodig Provox Skin Barrier aan. Provox Skin Barrier laat een beschermend laagje achter op de huid en zorgt ervoor dat de pleister beter hecht.


### 3. Aanbrengen

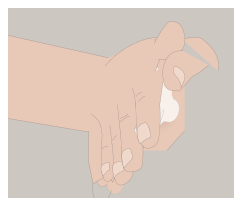


a) Wrijf de pleister tussen uw handen om hem op te warmen.

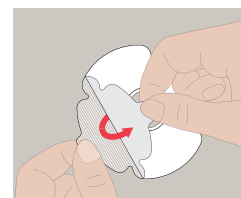

b) Verwijder de beschermfolie.

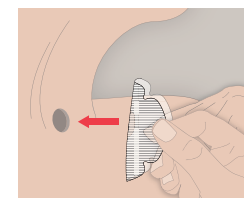


c) Breng de ring van de pleister zo dicht mogelijk bij de opening van uw stoma aan.

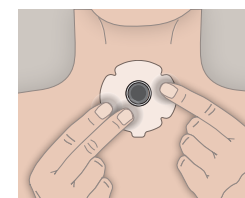

d) Masseer de pleister op uw huid. Begin bij uw stoma en masseer naar buiten toe. Masseer uiteindelijk de hele pleister.

### 4. Verwijderen

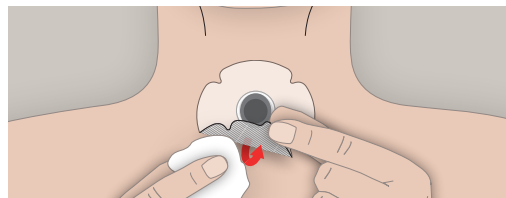


Verwijder de Standard Adhesive door eerst Provox Adhesive Remover aan te brengen boven op de pleister. Trek dan het vingerlipje omhoog en breng meer aan onder de pleister. Verwijder de pleister voorzichtig.

## Provox® Life™ Standard Adhesive



Provox Life Standard Adhesive is een pleister voor dagelijks gebruik. Hij is zacht, flexibel en onopvallend. Hij past goed rond uw stoma en dicht goed af.

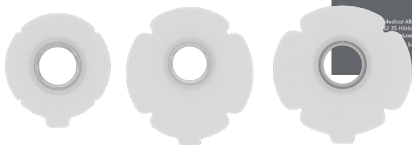

	Reinigen	Beschermen	Verwijderen	Beschrijving
	✓			<b>Provox® Cleaning Towel</b> Om de huid mee te reinigen voordat u een pleister aanbrengt
		✓		<b>Provox® Skin Barrier</b> Bevordert de hechting van de pleister en laat een beschermend laagje achter op de huid
			✓	<b>Provox® Adhesive Remover</b> Helpt bij het verwijderen van de pleister